

## 11710



## Hemos nacido con dos ojos. Ahora puedes enjuagar ambos de una sola vez con Duo

Muchos accidentes laborales afectan a ambos ojos. Sin embargo hasta ahora no has podido obtener un lavaojos móvil capaz de enjuagar ambos ojos a la vez. Por eso, en caso de accidentes graves te has tenido que plantear la difícil pregunta de ¿Qué ojo salvar?

Ahora ya no es necesario. Plum Duo es por tanto en muchos casos un suplemento necesario a tu sistema lavaojos habitual. Plum Duo está disponible como pH Neutral y solución lavaojos Plum con cloruro de sodio al 0,9 %.



Si ambos ojos se ven afectados por p.ej. ácido u otras sustancias nocivas, cualquier demora puede salir muy cara.



Con Duo puedes enjuagar ambos ojos a la vez. Un flujo suave enjuaga y extrae la sustancia nociva de los ojos.




La forma de las copas oculares ayuda a mantener los ojos abiertos.

EN 15154-4

## Prevención de lesiones oculares

En caso de accidente lo importante es enjuagar de la forma más rápida y eficaz para prevenir o limitar el daño provocado. El programa de productos es tan amplio que encontrarás la solución lavajos específica para cubrir los riesgos de tu lugar de trabajo.

En el plan de emergencia a continuación encontrarás información sobre el procedimiento de enjuagado según el tipo de accidente. El plan puede solicitarse por separado.

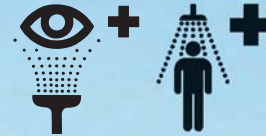

## Plan de emergencia ocular

TIPO DE LESIONES	LAVADO	CONTINUAR LAVADO	TIEMPO DE LAVADO
<b>Cuerpos extraños</b> p.ej. polvo, suciedad, astillas de metal o madera	Lavajos Plum	Lavajos Plum	Enjuagar hasta extraer el cuerpo extraño
<b>Lesiones con ácidos</b>	pH Neutral	Lavajos Plum	Enjuagar 2 minutos con pH Neutral hasta vaciar la botella y continuar con la solución lavajos Plum hasta recibir atención médica.
<b>Lesiones con álcalis</b>	pH Neutral	Lavajos Plum	Enjuagar 2 minutos con pH Neutral hasta vaciar la botella y continuar con la solución lavajos Plum hasta recibir atención médica.
<b>Otras lesiones</b> (p.ej. disolventes y aceites)	Lavajos Plum	Lavajos Plum	Enjuagar hasta que desaparezcan las molestias. Seguir enjuagando hasta recibir atención médica.
<b>Lesiones en la piel</b> causadas por ácidos, álcalis y sustancias químicas	pH Neutral	Lavajos Plum	Enjuagar 2 minutos con pH Neutral hasta vaciar la botella y continuar con la solución lavajos Plum hasta recibir atención médica.

**¡Importante!** En todo tipo de lesiones el líquido lavajos debe penetrar en el ojo con un flujo suave y uniforme. Presione ligeramente la botella, sin apretar demasiado. Consulte siempre con un médico y siga realizando el lavado ocular hasta recibir atención médica.

### Lesiones provocadas por ácidos y álcalis

En lesiones provocadas por ácidos y álcalis la corrosión comienza nada más producirse el contacto de la sustancia nociva con el ojo. Para este tipo de lesiones recomendamos pH Neutral seguido de la solución lavajos Plum.

### Lesiones mecánicas

El tiempo también es un factor importante en lesiones mecánicas provocadas por ejemplo por astillas de madera o metal, polvo o suciedad. En estos casos un enjuague inmediato puede

prevenir la fijación del cuerpo extraño, que puede provocar graves daños al ojo. La solución lavajos Plum es la elección ideal para estos casos.

### Encuentra la combinación que mejor se adapta a tus necesidades

Nuestro programa de productos consta de soluciones lavajos de distintos tamaños y para distintos tipos de lesiones según necesidad. Puedes seleccionar los productos y combinar un programa especialmente adaptado a las necesidades y a los riesgos de tu lugar de trabajo.